

# Diagrama de decisiones

PARA MANEJO DE TEJIDOS




Diseñamos nuestros productos de manejo de tejidos para que trabajen conjuntamente.

Esto significa que los odontólogos pueden personalizar el tratamiento con instrumentación y fórmulas intercambiables, dependiendo del caso. Ya sea que esté tomando impresiones, completando una restauración tipo V o colocando una corona, hay un producto excepcional para ello.

En últimas, la decisión final depende de la preferencia personal del odontólogo, pero aquí están nuestros usos recomendados de nuestra línea de manejo de tejidos.

# Diagrama de decisiones

PARA MANEJO DE TEJIDOS

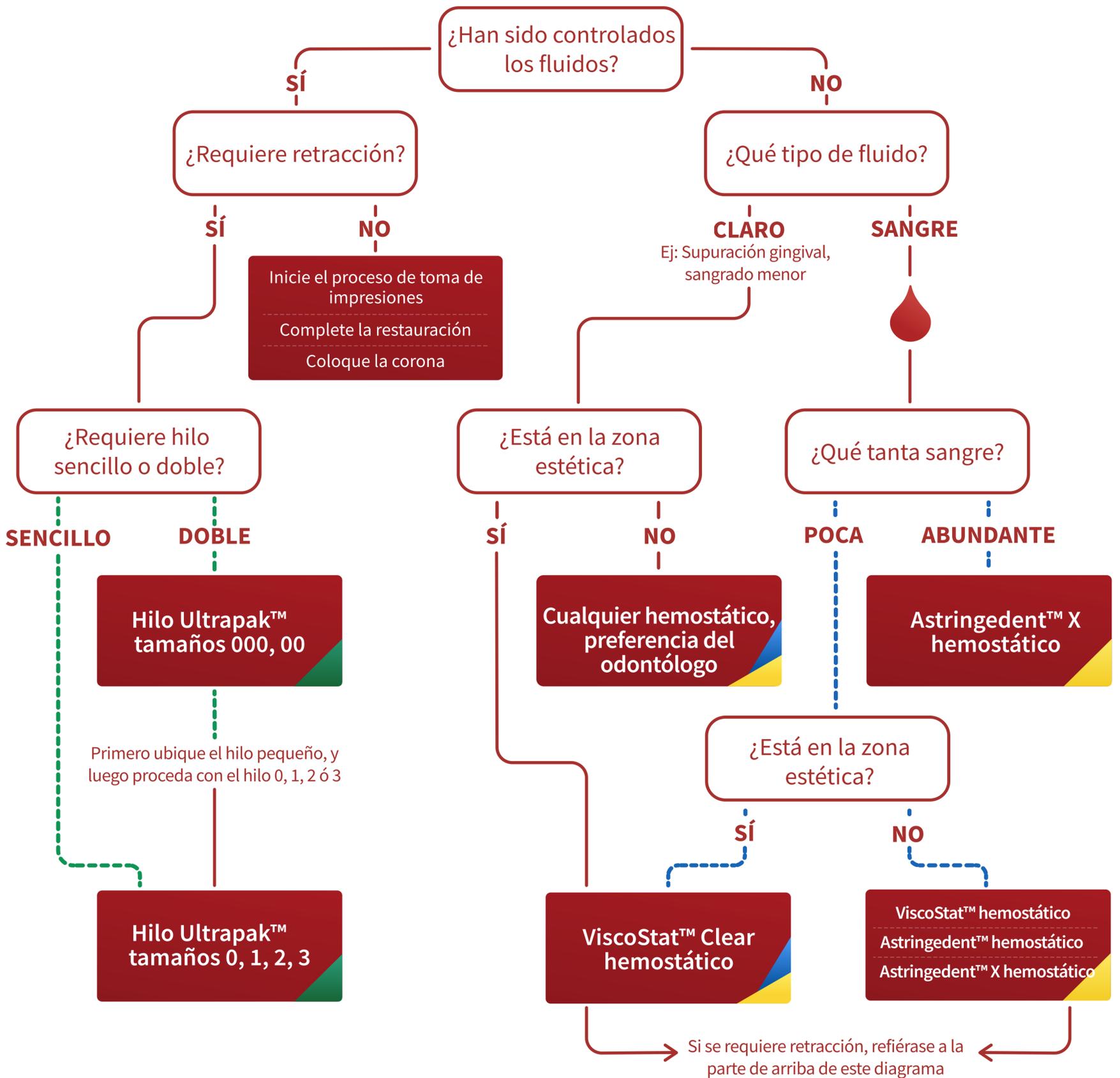

## CONVENCIONES

### --- Indicador de técnica de bruñido

Asegúrese de frotar firmemente en el surco. Aplicar presión firme contribuye a mayor eficacia del hemostático.

### --- Indicador de técnica de humedecido del hilo

Remoje el primer hilo en agente hemostático.

### ▲ Fischer's Ultrapak™ Packers

Especialmente diseñados para facilitar el empaqueo del hilo de retracción Ultrapak. Los bordes extra finos ayudan a poner presión sobre el hilo y el borde dentado reduce el riesgo de que se resbale y corte la incisión gingival.

### ▲ Punta Blue Mini™ Dento-Infusor™

- Utilizadas para tejido que está sanando o en caso de sensibilidad.
- Si solo se requiere control de fluido sulcular, sugerimos la punta suave del Blue Mini Dento-Infusor

### ▲ Metal Dento-Infusor™ Tip

- Para infundir agentes hemostáticos efectivamente. Preferida para sangrado, incluso si es abundante, e ideal para eliminar coágulos superficiales.
- Aguja doblada con extremo con cepillo acolchado para infundir y limpiar el corte del surco.